


## LED耳かき USB充電式 取扱説明書

OM-EPRC  
ピンク

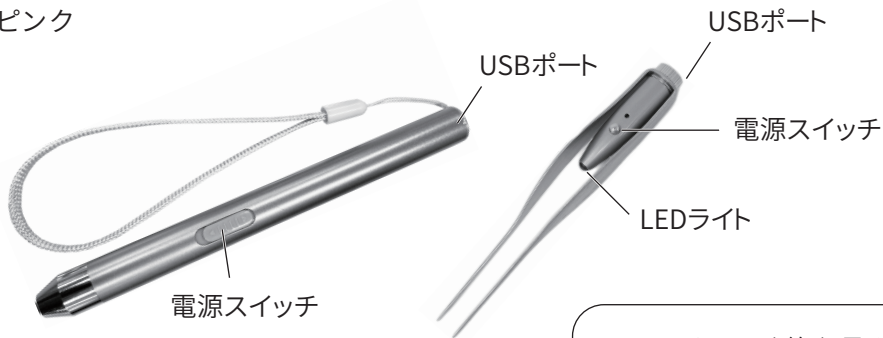

耳かき：（約）長さ 14.5 cm  
ピンセット：（約）長さ 12.0 cm

はじめに

本製品はUSB充電式です。付属のUSBケーブルを繋いで充電してからお使い下さい。  
約30分で充電が完了します。満充電からの連続使用可能時間は【約1時間】です。


## 耳かき

- ① 耳かき本体に先端パーツを合わせ、回してはめて下さい。
- ② 電源スイッチを下にスライドさせ、LEDライトをつけてご使用下さい。

### ● 先端パーツ

ロング : 適度な硬さで大人向け

ショート : 柔軟性があり、お子様向け

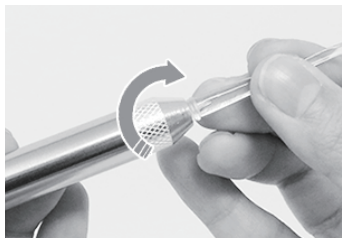

## ピンセット

電源スイッチについている保護カバーを外してLEDライトをつけてご使用下さい。

※こちらの製品は精密な作業を目的とされており、かみ合わせがぴったりと合わない可能性があります。その場合は、お客様にて先端の両サイドから圧をかけるなど微調整をお願いします。

## 使用上のご注意

- ※ ご使用後はピンセットの先や先端パーツを水洗いして清潔に保管して下さい。
- ※ 強い力で掃除すると、皮膚等を傷付けてしまう恐れがあります。ご注意ください。
- ※ 故障の原因になりますので、分解・改造等は行わないで下さい。
- ※ 製品改良により、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。