

集音器(ER-EASC) 取扱説明書



・集音器本体



・イヤープース(小、大)






・ボタン電池(LR44)



・収納ケース

電池の入れ方

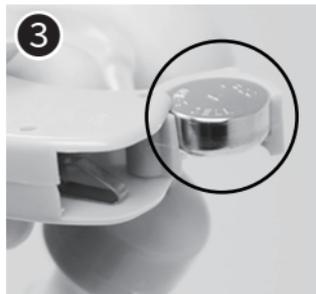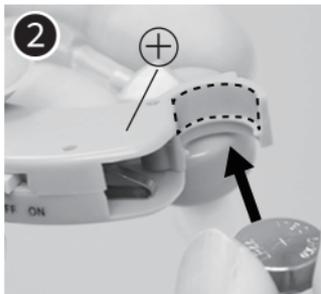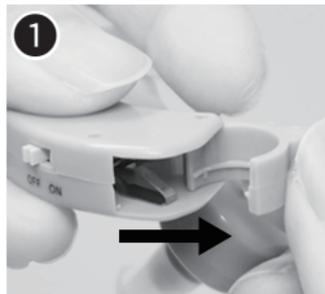

耳掛け部分の電池カバーを上をスライドさせ、カバー内側にプラス面を上側にしてボタン電池をセットします。そのままカバーを下をスライドさせ、しっかり閉まったら完了です。

ご使用方法


★使用時間は約40時間です。




① イヤホンをひねり
左右を調節します。




② 電源をONにします。

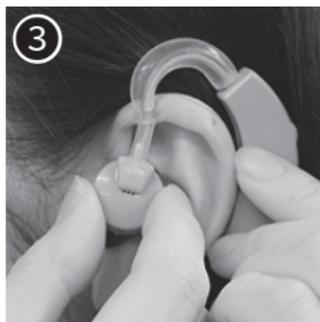

③ 耳に装着します。

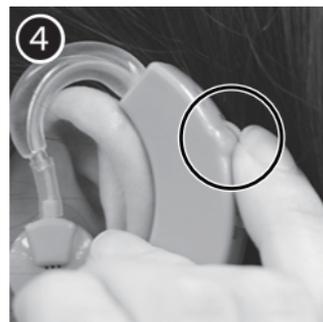


④ ダイヤルで音量を
調節します。

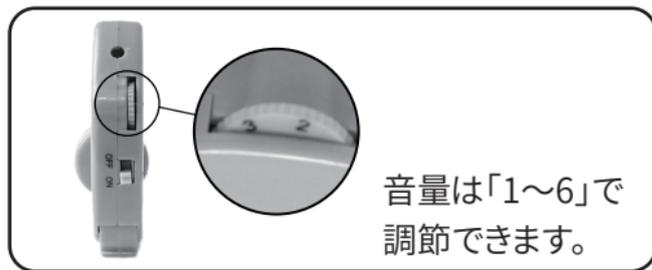

音量は「1～6」で
調節できます。

★イヤピースの付け方

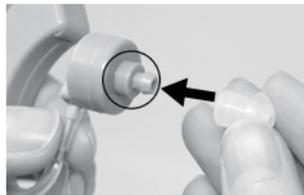

イヤホンの先端に
はめるだけ!

※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。